



KW Desinfektion

LIFE  CLEAN



Kasutusalaad/töömeetodid

Pesemisomadustega desinfitseerimisaine pindadele

Kasutusotstarve

Patenteeritud alkoholivaba, pesemisomadustega desinfitseerimisaine kõikidele pindadele ja vahenditele. Koosneb 99,6% ulatuses veest.

KW Disinfection LifeClean on lihtne kasutada – kandke ainet pinnale, laske mõjuda ja pühkige. Tootel on laialdane kasutusvaldkond: haiglad, tervishoiuasutused, hooldusteenused, toiduainete käitlemine, puhastusteenused ja lasteaiad.

KW Desinfektion LifeClean hävitab võimaliku biokile, takistab multiresistentsuse teket ja väljakujunemist ning omab eriti laia spektriga desinfitseerivat toimet. Toimeaeg 30 s - 2 min sõltuvalt mikroobist.

Tõhus selliste bakterite vastu nagu E. coli, Salmonella ja Campylobacter (*2 min), ümbrisega viiruste vastu nagu gripiviirus, herpes simplex viirus, HIV ja B-hepatiit (*30 s-1 min), ümbriseta viiruste vastu nagu kalitsiviirus, polio- ja adenoviirus (*1 min), pärmseente vastu nagu C. albicans ja C. Auris (*1-2 min), musthallituse ja eoste vastu (sh Clostridioides difficile (*2 min)).

Biotsiidimäärus: PT 2, PT 3, PT 4.

High-level disinfectant.

Kasutage biotsiidi ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tooteteave.

Ainult professionaalseks kasutamiseks

*toote mõjuaeg pinnal enne pinnalt eemaldamist

Tootekood

1809805

180981

Müügipartii

6 x 500 ml

6 x 1 L

GTIN (tk)

6420617270193

6420617271756

Omadused

Kollakas kergelt kloorilõhnaline vedelik

Toode on kiiresti biolagunev

KW Desinfektion LifeClean vastab järgmistele EN standarditele:

EN 13697, EN 13704, EN 17126, EN 13727 (eosed)

EN 14476, EN 16777, EN 14675, EN 14349 (ümbrisega ja ümbriseta

viirused), sealhulgas polioviirus, adenoviirus, murine noroviirus

(MNV), SARS-CoV-2 (Covid-19)

EN 14561, EN 14563, EN 14348, EN 14562, EN 13727, EN 16615,

EN 17387 (bakterid, sh. mükobakterid)

EN 13624, EN 14562, EN 16615, EN 17387 (seened, pärmid)

Koostis

Klooridioksiidi segu 200 ppm ClO₂ ja pindaktiivsed ained

Kasutusvalmis, hoiatusmärgid puuduvad

Keskkonna ohutus

Pakendi taaskasutusjuhised toote etiketil

Sisu kasutusest kõrvaldamise juhised toote ohutuskaardil

Säilitamine

Säilitada toatemperatuuril päikesevalguse eest kaitstult.

Vaadake kõlblikkusaega pakendilt, säilivusaeg 18 kuud alates

valmistamiskuupäevast. Säilib avatuna 4 nädalat alates

avamiskuupäevast. Säilitada ainult originaalpakendis.

Tootjariik

Soome

Tootekaart 3/2023

kemvit

PUHTAUS
JONKA
TUNNET



KW Desinfektion

LIFE  CLEAN



Kasutusalaad/töömeetodid

Kasutusjuhend

Sobib kõikidele pindadele ja töötab igasugustes tingimustes

1. Kandke/pihustage KW Desinfektion puhastatavale pinnale.
2. Toimeaeg 30 s – 2 min.
3. Pühkige pind.
4. Märkige etiketile toote avamise kuupäev. Avatud toote kasutusaeg on 4 nädalat. Sulgege pakend alati pärast kasutamist.

KW Desinfektion ei kujuta ohtu tervisele ega keskkonnale.

Kasu

- Üks toode kõikide pindade desinfitseerimiseks
- Kliiniliselt testitud, sertifitseeritud vastavalt EN standarditele
- Suurepärase puhastusefekt
- Eemaldab biokile
- Keskkonnasõbralik – väike doseering
- Meeldiv töötada – õrn lõhn
- Puudub resistentsuse tekkimise oht

Ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootekaart 4/2023